

Original - Vattenbaserat glidmedel

Användarmanual

Best Friend
moments



Finns i 50 ml eller 100 ml

Glidmedel är en självklarhet tillsammans med samtliga sexhjälpmedel. Glidmedel kan med fördel användas tillsammans med läkemedel som har torra slemhinnor som biverkning, liksom vid behandling med Ovesterin.

Belladot glidmedel är av yttersta kvalitet och innehåller mycket fina råvaror, vilket borgar för en hudvänlig och skonsam produkt.

Tips!

Smaka och dofta på två original-glidmedel efter varandra. Ju mindre bismak eller doft, desto bättre kvalitet på råvaran. Ju mer bismak eller doft, ju sämre råvarukvalitet.

Om Original vattenbaserat glidmedel

Vattenbaserat oparfymrat glidmedel, speciellt utvecklat för intima stunder. Några droppar ger ett härligt glid. Tvättas lätt bort och kladdar inte. Glidmedlet har ingen doft eller färg och är särskilt mild mot den känsliga huden i underlivet. Går utmärkt att använda ihop med kondom.

Belladot vattenbaserat glidmedel har fina glidegenskaper tack vare den höga kvaliteten på varje råvara. Det gör att Belladot vattenbaserade glider lika länge som många andra silikonbaserade.

De fina naturliga råvarorna gör att det inte finns några bismaker eller dofter, vilket är en kvalitetsmarkör. Läs mer i tipsrutan till vänster.

Belladot vattenbaserade glidmedel är lämpligt för personer med särskilt känsliga slemhinnor. Det har en perfekt avvägd pH-nivå på 4,7, vilket är optimalt för underlivet.

Varför använda glidmedel?

Sex ska vara skönt. Glidmedel minskar friktionen och gör det skönare både vid onani och vid samlag.

Kvinnors sekret varierar i mängd och konsistens och kan påverkas vid hormonförändringar, användande av tampong, medicinering mm. Vid klimakteriet förändras slemhinnorna så att de blir torrare, skörare och därmed mer känsliga. Glidmedel är ett enkelt hjälpmedel för att kunna fortsätta njuta av sex när kroppens egna smörjmedel inte räcker till.

Omskurna män har stor nytta av en droppe glidmedel på ollonet vid onani.

Det är ett måste att använda glidmedel vid analsex för att inte skada de känsliga slemhinnorna (vid analsex rekommenderar vi ett silikonbaserat glidmedel, se separat faktablad).

Vid användande av hjälpmedel och sexleksaker ska man alltid nyttja glidmedel.

Om vattenbaserat glidmedel

Vattenbaserade glidmedel absorberas av huden och glidförmågan avtar därför löpande för att helt upphöra. Belladot glidmedel är dock dryga, mycket tack vara den fina kvaliteten på råvaror och ingredienser. Vattenbaserade glidmedel lämnar inga fläckar och är lätt att tvätta av och är garanterat kondomsäkra.

Mer info finns på www.belladot.com/sexologensvarar/



Kontakta oss
för ytterligare frågor:
info@belladot.com
031-653300

pH
4,7

Naturliga
råvaror

belladot®